

## PREGLED PODRUČJA DJELOVANJA I PRIMJENE

	DEZINFEKCIJA	NA LISTI VAH/DGHM <sup>2</sup>	UDOVOLJAVAJA EUROPSKIM STANDARDIMA	ČISTI	BAKTERIOCID	TUBERKULOCID	FUNGOCID <sup>3</sup>	VIRUSOCID NA ODREĐENOM STUPNJU <sup>4</sup> (VIRUSIS OVOJNICOM UKLJUČUJUĆI HBV, HCV I HIV)	VIRUSOCID (EFEKTIVAN PROTIV SVIH VIRUSA)	BIORAZGRADIV	BEZ ALDEHIDA	KONCENTRACIJA ZA PRIMJENU	POTREBNO VRIJEME ZA EFIKASNO DJELOVANJE (u min)	POTREBNO VRIJEME ZA EFIKASNO DJELOVANJE (u min) U ULTRASONIČNOJ KUPKI	VRIJEME DJELOVANJA U DANIMA
<b>KOŽA I RUKA</b>															
HD 410 dezinfekcija ruku <sup>1</sup>	■	■	■		■	■	■	■		■	■	nerazrijeđen	0,25/1,5 <sup>8,9</sup>		
HD 430 sapun s pjenom <sup>1</sup>				■						■	■				
HD 435 losion za pranje (pH 5,4) <sup>1</sup>				■						■	■				
HD 440 losion za njegu										■	■	nerazrijeđen			
HD 425 losion za pranje (pH 5,4) za Hygocare <sup>1</sup>				■						■	■				
<b>POSEBNA PODRUČJA</b>															
Orotol Plus dezinfekcija usisnih sistema	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	2%	60 <sup>5</sup>		
Orotol Ultra dezinfekcija usisnih sistema	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	1%	60 <sup>5</sup>		
MD 555 Cleaner za specijalna područja				■						■	■	2,5% / 5%	30/15		
MD 550 za čišćenje pljuvačnice				■	■		■			■	■	nerazrijeđen	približno 5		
MD 520 dezinfekcija otisaka	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	nerazrijeđen	5 <sup>5</sup> /10 <sup>10</sup>		7
MD 530 za čišćenje zubnih proteza/uklanjanje cementa				■						■	■	nerazrijeđen	max 10	max 10	
MD 535 za čišćenje gipsa				■						■	■	nerazrijeđen	po potrebi	po potrebi	
<b>INSTRUMENTI</b>															
ID 212 dezinfekcija instrumenata	■	■	■	■	■		■	■		■	■	2%	55/1010	2	7
ID 212 forte dezinfekcija instrumenata	■	■		■	■	■	■	■		■	■	2%	15/60 <sup>5</sup>	5 <sup>6</sup>	7
ID 213 dezinfekcija instrumenata	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2%	15/60 <sup>5</sup>	2 <sup>7</sup>	14
ID 220 dezinfekcija svrdala	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	nerazrijeđen	15	0,5 <sup>5</sup>	7
<b>POVRŠINE</b>															
FD 300 dezinfekcija površina	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	0,5% / 1%	60 <sup>5</sup> /15		
FD 312 dezinfekcija površina	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	1%	60 <sup>5</sup>		
FD 370 cleaner za čišćenje u kirurgiji				■						■	■	1% / 2%			
FD 322 brzodjelujuća dezinfekcija površine	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	nerazrijeđen	1 <sup>5</sup>		
FD 333 brzodjelujuća dezinfekcija površine	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	nerazrijeđen	2 <sup>5</sup>		
FD 360 čišćenje sintetičke kože (presvlaka)				■						■	■	nerazrijeđen			
FD 366 sensitive brzodjelujuća dezinfekcija površine	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	nerazrijeđen	1		
FD 300 top maramice (bez alkohola)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	nerazrijeđen	2		
FD 312 mokre maramice (bez alkohola)	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	nerazrijeđen	60		
FD 350 maramice za dezinfekciju (s alkoholom)	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	nerazrijeđen	1		

<sup>1</sup>ublažavajuće djelovanje

<sup>2</sup>u skladu s VAH/DGHM: Njemačko udruženje znanstvenih eksperata koji su se posvetili promociji i medicinskim istraživanjima na području infektologije i mikrobiologije

<sup>3</sup>testirano na Candida albicans

<sup>4</sup>u skladu s RKI preporukom

<sup>5</sup>uključujući bakteriju tuberkuloze

<sup>6</sup>za bakteriju tuberkuloze 4%/30 min

<sup>7</sup>za bakteriju tuberkuloze 2%/30 min

<sup>8</sup>higijenska dezinfekcija ruku/kirurška dezinfekcija ruku

<sup>9</sup>za bakteriju tuberkuloze 0,5 minute

<sup>10</sup>u Dürr Hygojet-u